



Rolstoelfixatie & aanbrengen van de driepuntsgordel

Stap 1. Aanhaken

Neem de zwarte retractor haak (voorzijde rolstoel) in een vloeiende beweging uit de vloer en haak deze aan op de juiste bevestigingspunten van de rolstoel. Start aan voorzijde, hierna de achterzijde van de rolstoel.

Stap 2. Controleren

Indien de 4 haken / retractoren zijn aangelegd dient men te controleren of de rolstoel vast staat. Dit doet men door de rolstoel naar voren / achteren te bewegen. Tevens komen de spanbanden op spanning.

Stap 3. Veiligheidsgordel

Neem de veiligheidsgordel van de raamstijl en breng deze aan op het gordelpunt in de vloer (gordelpunt aan de zijwand zijde).

Koppel deze vast en trek de gordel in zijn geheel uit de vloer. Zie foto 1.

Breng vervolgens de gordel aan / over de rolstoelpassgier als een driepuntsgordel en klik deze op het overgebleven gordelpunt van de retractorplaat. Zie foto 2.





1



2

Stap 4. Ontgrendelen

Schuif met de voet de ontgrendel pal naar voren; hierdoor kantelt het ontgrendelpedaal. Het systeem ontgrendelt als het pedaal met de voet (naar beneden) wordt ingedrukt. Als het systeem ontgrendeld is kan men de retractorhaken weer opbergen. Als afsluiting het pedaal met de voet weer naar achteren bewegen en het systeem is weer klaar voor gebruik.

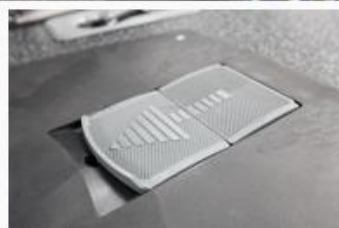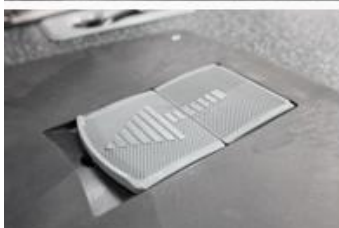



Bediening van de stoelen

1. Armlegger
2. Zitvlak omklappen
3. Draaiknop t.b.v. de rugverstelling van de stoel
4. Handel t.b.v. het draaien van de stoel in zitpositie

